

La AEMPS informa de la retirada de determinados lotes de sistemas de peróxido para lentes de contacto distribuidos por Disop

NOTA DE SEGURIDAD

Fecha de publicación: 01 de julio de 2025

Categoría: productos sanitarios, seguridad

Referencia: PS, 29/2025

- Si los comprimidos neutralizadores no se diluyen correctamente en el tiempo requerido, la solución desinfectante podría no neutralizarse por completo
- Esta circunstancia puede provocar irritación ocular, dolor, inflamación, enrojecimiento y otro tipo de lesiones oculares
- La Agencia establece una serie de recomendaciones de actuación dirigidas a personas usuarias, distribuidores y centros sanitarios

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la empresa Disop S.A., España, de la retirada del mercado de ciertos lotes de sistemas desinfectantes de peróxido al 3% para lentes de contacto de determinadas marcas y referencias, debido a la posibilidad de que los comprimidos neutralizadores no se diluyan correctamente en el tiempo requerido y que, por tanto, la mezcla de peróxido no se neutralice completamente.

Los sistemas de desinfección y neutralización a base de peróxido de hidrógeno al 3% están destinados a la limpieza y desinfección diaria de todo tipo de lentes de contacto: convencionales, blandas, desechables, de hidrogel, de silicona y rígidas permeables al gas.

La presencia de peróxido sin neutralizar en la solución puede provocar efectos adversos si entra en contacto con la superficie ocular a través de la lente. Entre las posibles reacciones se encuentran irritación, dolor, inflamación, enrojecimiento, queratitis osmótica, inflamación del párpado, hiperemia conjuntival o incluso quemaduras oculares.

Situación actual en España

Los productos afectados han sido distribuidos en España por la empresa Disop S.A.

La empresa está enviando una nota de aviso dirigida a [personas usuarias](#), así como otra a [distribuidores y establecimientos sanitarios](#) para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Productos afectados

Sistemas desinfectantes de peróxido al 3% de un solo paso, destinados a la limpieza de lentes de contacto.

Las marcas comerciales, referencias y números de lote afectados se recogen en el [listado de productos afectados](#) en España.



Información para personas usuarias

- Compruebe en el listado de productos afectados si su sistema de peróxido para la desinfección de sus lentes de contacto es alguno de los afectados por este problema.
- Si tiene alguno de los lotes de los productos afectados, deje de usarlo inmediatamente.
- No deseche el producto. Guárdelo en un lugar separado y contacte con el establecimiento donde lo adquirió para su devolución.
- Si ha usado el producto recientemente y nota alguna molestia ocular, lave cuidadosamente sus ojos con abundante solución salina o lágrima artificial estéril, y consulte a su profesional de salud visual (óptico u oftalmólogo).



Información para distribuidores y establecimientos sanitarios

- Revise su inventario y localice los productos y lotes afectados. Una vez identificados, sepárelos, póngalos en cuarentena, no los distribuya ni utilice y espere instrucciones específicas del fabricante para su retirada.
- Si ha suministrado algún producto afectado a otros distribuidores o centros, remítales la [nota de aviso dirigida a clientes](#).
- Si ha distribuido el producto a usuarios finales, envíeles la [nota de aviso dirigida a personas usuarias](#) usuarias e infórmeles de las medidas que deben adoptar, incluyendo la observación de posibles síntomas y la recomendación de consultar con un profesional de la salud visual.

Datos del fabricante

- Disop S.A., Avenida de Valdeparra 31, 28108, Alcobendas.



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.