

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

A nuestros clientes de
estaciones de anestesia Dräger Atlan

Abril 2026

Suplemento al Aviso Importante de Seguridad

Posible fallo de la ventilación automática debido a un fallo en la electrónica del motor

SOLO están afectadas las estaciones de anestesia Atlan del listado adjunto.
Otros dispositivos de anestesia NO se ven afectados

Estimados Sres.,

Como parte de una medida correctiva en Octubre 2024, distribuimos el **Aviso Importante a de Seguridad adjunto** y, como medida preventiva, sustituimos los motores de los ventiladores que habían resultado dañados por una desviación temporal en el proceso de montaje.

Durante nuestra continua vigilancia de mercado de producto global, hemos detectado que un número limitado de dispositivos Atlan adicionales se vieron afectados por este aviso de Octubre 2024 y, como medida de preventiva, estamos sustituyendo estos motores de ventilación.

Por favor, consulte el **Aviso Importante de Seguridad** adjunto con fecha de Octubre 2024 y la lista de dispositivos Atlan afectados.

Por favor, asegúrese que todos los usuarios de Dräger Atlan y otras personas afectadas de su centro tomen nota de este Aviso Importante de Seguridad.

Para confirmarlo, por favor, cumplimente la tarjeta de respuesta adjunta y envíenosla en un plazo de 14 días.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
Dirección postal:
23542 Lübeck, Alemania
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Datos bancarios:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00
Código Swift: COBA DE FF 230

Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17
Código Swift: NOLADE21SPL

Sede social: Lübeck
Registro mercantil:
Juzgado Local de Lübeck HRB 7903 HL
Socio general:
Drägerwerk Verwaltungs AG
Sede social: Lübeck
Registro mercantil:
Tribunal Local de Lübeck HRB 7395 HL
N.º UID DE135082211

Presidenta del Consejo de Supervisión de
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Maria Dietz

Presidente del Consejo de Supervisión de
Drägerwerk Verwaltungs AG: Stefan Lauer

Consejo de Administración:
Stefan Dräger (presidente)
Stefanie Hirsch
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske
Anton Schrofner

Si ha puesto los productos a disposición de terceros, por favor, envíeles una copia del presente Aviso Importante de Seguridad

Por favor, conserve el presente Aviso Importante de Seguridad hasta que se hayan sustituido los componentes afectados.

Las autoridades competentes han sido informadas sobre esta acción.

Identificación de los dispositivos médicos afectados:

Según nuestros registros, Vd. ha recibido al menos un dispositivo de anestesia Atlan fabricada por Drägerwerk AG & Co. KGaA (número de registro único europeo: DE-MF-000005329) que puede verse afectada por esta incidencia. Por favor, consulte la lista adjunta de dispositivos Atlan afectados. Nuestro servicio técnico Dräger se pondrá en contacto con Vd., y concertará una cita para sustituir el motor del ventilador de forma gratuita.

Si requiere alguna aclaración, no dude en ponerse en contacto con su representante local Dräger.

Lamentamos los inconvenientes que esta medida pueda causarle.

Un cordial saludo

Firmado en versión inglesa

Christoph Marquardt
Product Management
Therapy Business Unit

Oliver Möller
Post Market Surveillance
Quality and Regulatory Affairs

Anexos:

- **Aviso importante de seguridad**
- **Lista de dispositivos Atlan afectados**
- **Tarjeta de respuesta**

ANEXO 1: NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD de Octubre 2024 - página 1 de 2 -

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

A nuestros clientes de las
estaciones de anestesia Atlan

Octubre 2024

Nota Importante de Seguridad

Posible fallo de la ventilación automática
debido a un error en la electrónica del motor

**Sólo están afectadas las estaciones de anestesia Atlan A100, A300, A300XL, A350 y A350XL
con números de serie según la lista adjunta.**

Ningún otro modelo de equipo de anestesia está afectado

Estimados Sres.,

Durante nuestras actividades de vigilancia de mercado de producto global, hemos detectado casos en los que las estaciones de anestesia Atlan han indicado un fallo del pistón del ventilador antes del uso o un fallo de la ventilación mecánica durante el uso. Hasta la fecha, no se ha reportado ningún daño a paciente.

Nuestras investigaciones han revelado que estas incidencias se deben a un fallo en la electrónica del motor causado por una desviación en el proceso de ensamblado de carácter temporal. Esto podría afectar a las estaciones de anestesia Atlan con números de serie dentro del intervalo mencionado anteriormente. Según nuestros registros, Vd. ha recibido uno o más equipos dentro del intervalo de números de serie afectados.

Si el error se produce antes del uso, por ejemplo, cuando está en modo espera o durante en modo test del sistema, la ventilación mecánica podría no iniciarse. Si el error ocurre durante una intervención, la ventilación mecánica podría fallar y el equipo mostrará una alarma con el mensaje: «¡Fallo del ventilador!». En ambos casos, se puede llevar a cabo la ventilación o la respiración manual. Podría ser necesario ventilar al paciente manualmente para evitarle lesiones. Aun con la alarma de fallo de ventilación, el Atlan seguirá funcionando en modo de ventilación Man/Spon, al igual que la dosificación de gas limpio, medicamento y todas las funciones de monitorización sin restricciones.

Nuestro servicio técnico Dräger Service contactará con Vd. para sustituir el motor gratuitamente.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
Dirección postal:
23542 Lübeck, Alemania
Tel. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Cuenta bancaria:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00
Swift-Code: COBA DE FF 230

Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NOLADE21SPL

Sede de la sociedad: Lübeck
Registro mercantil:
Juzgado municipal de Lübeck HRB
7903 HL
Socio colectivo:
Drägerwerk Verwaltungs AG
Sede de la sociedad: Lübeck
Registro mercantil:
Juzgado municipal de Lübeck HRB
7395 HL
N.º de IVA: DE135082211

Presidente del Consejo de
Supervisión de
Drägerwerk AG & Co. KGaA y
Drägerwerk Verwaltungs AG:
Stefan Lauer

Junta directiva:
Stefan Dräger (Presidente)
Stefanie Hirsch
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske

ANEXO 1: NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD de Octubre 2024 - página 2 de 2 -

Hasta entonces, por favor, continúe utilizando sus equipos con el cuidado habitual y bajo supervisión permanente conforme a las Instrucciones de uso del Atlan.

Si la ventilación mecánica fallase, utilice el modo de ventilación Man/Spon para ventilar al paciente manualmente cuando sea conveniente.

Si es necesario, puede reducir la prioridad de alarma «¡Fallo del ventilador!» con «RESTABLECIMIENTO DE ALARMA».

Lamentamos los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar.

Por favor, asegúrese de que todos los usuarios del Atlan, así como el resto del personal de su organización estén informados de esta Nota Importante de Seguridad.

Por favor, cumplimente y devuelva la Tarjeta de respuesta adjunta para su confirmación.

Si ha puesto a disposición de terceros los equipos, por favor, envíeles copia de la presente Nota Importante de Seguridad.

Por favor, conserve la presente Nota Importante de Seguridad al menos hasta que el motor se haya reemplazado.

Se ha informado a las autoridades competentes sobre esta acción.

Identificación de los productos sanitarios afectados:

Según nuestros registros, Vd. ha recibido al menos un dispositivo de anestesia Atlan fabricado por Drägerwerk AG & Co. KGaA que podría verse afectado por esta incidencia.

Contacto:

Si requiere alguna aclaración, por favor, no dude en ponerse en contacto con su representante local Dräger.

Lamentamos los inconvenientes que esta medida pueda causarles.

Un cordial saludo,

Firmado en versión inglesa

Christoph Marquardt
Product Management
Business Unit Therapy

Oliver Möller
Post Market Surveillance
Quality and Regulatory Affairs

ANEXO 2:

Device	Part number	Basic UDI DI
Atlan A100	8621100	040486751301035FK19X030W4
Atlan A100 XL	8621200	
Atlan A300	8621300	040486751301035FK19Z000W9
Atlan A300 XL	8621400	
Atlan A350	8621500	040486751301035FK19T010V2
Atlan A350 XL	8621600	

UDIs for Atlan A100

(01)4048675594963(11)231025(21)ASSL-0427(93)8621100-04	(01)4048675594963(11)231107(21)ASSM-0033(93)8621100-04
(01)4048675594963(11)231108(21)ASSM-0029(93)8621100-04	(01)4048675594963(11)231107(21)ASSM-0034(93)8621100-04
(01)4048675594963(11)230810(21)ASSJ-0065(93)8621100-03	(01)4048675594963(11)231107(21)ASSM-0035(93)8621100-04
(01)4048675594963(11)231108(21)ASSM-0030(93)8621100-04	(01)4048675594963(11)231107(21)ASSM-0036(93)8621100-04
(01)4048675594963(11)231108(21)ASSM-0031(93)8621100-04	(01)4048675594963(11)231030(21)ASSL-0462(93)8621100-04
(01)4048675594963(11)231108(21)ASSM-0032(93)8621100-04	

UDIs for Atlan A100 XL

(01)4048675594956(11)231025(21)ASSL-0422(93)8621200-04	(01)4048675594956(11)231108(21)ASSM-0028(93)8621200-04
(01)4048675594956(11)231108(21)ASSM-0027(93)8621200-04	

UDIs for Atlan A300

(01)04048675556343(11)240108(21)ASSN-0304(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230120(21)ASSA-0402(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240108(21)ASSN-0305(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230120(21)ASSA-0403(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240108(21)ASSN-0306(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230120(21)ASSA-0404(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240108(21)ASSN-0307(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230102(21)ASSA-0006(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240109(21)ASSN-0311(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230102(21)ASSA-0007(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240109(21)ASSN-0312(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230102(21)ASSA-0008(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240109(21)ASSN-0313(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230102(21)ASSA-0009(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240104(21)ASSN-0237(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230102(21)ASSA-0010(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240104(21)ASSN-0238(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230102(21)ASSA-0011(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240104(21)ASSN-0239(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)221222(21)ASRN-0432(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230711(21)ASSH-0017(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)221222(21)ASRN-0433(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230720(21)ASSH-0164(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)221222(21)ASRN-0434(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240109(21)ASSN-0314(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)221222(21)ASRN-0435(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240109(21)ASSN-0315(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)221222(21)ASRN-0436(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240109(21)ASSN-0316(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)221222(21)ASRN-0437(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231005(21)ASSL-0012(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0347(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231005(21)ASSL-0013(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0348(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231005(21)ASSL-0014(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0349(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231005(21)ASSL-0015(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0350(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230929(21)ASSK-0349(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0351(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230929(21)ASSK-0350(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0352(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231002(21)ASSK-0351(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230119(21)ASSA-0377(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230929(21)ASSK-0352(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230119(21)ASSA-0378(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231002(21)ASSK-0353(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230119(21)ASSA-0379(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231017(21)ASSL-0225(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230119(21)ASSA-0380(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231017(21)ASSL-0226(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230119(21)ASSA-0381(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231017(21)ASSL-0227(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230119(21)ASSA-0382(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231017(21)ASSL-0228(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230119(21)ASSA-0383(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231017(21)ASSL-0229(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230119(21)ASSA-0384(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231006(21)ASSL-0059(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0341(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231006(21)ASSL-0060(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0342(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231006(21)ASSL-0061(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0343(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231006(21)ASSL-0062(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0344(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231006(21)ASSL-0063(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0345(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231009(21)ASSL-0064(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230118(21)ASSA-0346(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231009(21)ASSL-0065(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230105(21)ASSA-0083(93)8621300-13

(01)4048675556343(11)231027(21)ASSL-0398(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)240111(21)ASTA-0006(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230316(21)ASSC-0222(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)240206(21)ASTA-0324(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230316(21)ASSC-0223(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231024(21)ASSL-0364(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230317(21)ASSC-0224(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231025(21)ASSL-0388(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230317(21)ASSC-0225(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231025(21)ASSL-0389(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230317(21)ASSC-0226(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231107(21)ASSM-0037(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230317(21)ASSC-0227(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231130(21)ASSM-0438(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230317(21)ASSC-0228(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231129(21)ASSM-0437(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230320(21)ASSC-0246(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230123(21)ASSA-0443(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231018(21)ASSL-0231(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230124(21)ASSA-0481(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231017(21)ASSL-0232(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230124(21)ASSA-0483(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231006(21)ASSL-0045(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230220(21)ASSM-0322(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230728(21)ASSH-0219(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230214(21)ASSB-0223(93)8621300-15
(01)04048675556343(11)240202(21)ASTA-0292(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230214(21)ASSB-0224(93)8621300-15
(01)04048675556343(11)240202(21)ASTA-0291(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230111(21)ASSA-0220(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240206(21)ASTA-0326(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230123(21)ASSA-0211(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240209(21)ASTA-0383(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230302(21)ASSB-0497(93)8621300-15
(01)04048675556343(11)240209(21)ASTA-0385(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230302(21)ASSB-0498(93)8621300-15
(01)04048675556343(11)240212(21)ASTA-0410(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230302(21)ASSB-0513(93)8621300-15
(01)04048675556343(11)240125(21)ASTA-0173(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230317(21)ASSC-0273(93)8621300-15
(01)04048675556343(11)240125(21)ASTA-0174(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230925(21)ASSK-0249(93)8621300-15
(01)04048675556343(11)240125(21)ASTA-0175(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230123(21)ASSA-0442(93)8621300-13
(01)04048675556343(11)240125(21)ASTA-0176(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230123(21)ASSA-0444(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231116(21)ASSM-0217(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230123(21)ASSA-0430(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231116(21)ASSM-0218(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230215(21)ASSB-0243(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231116(21)ASSM-0219(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230102(21)ASSA-0001(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231025(21)ASSL-0365(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230511(21)ASSE-0049(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231205(21)ASSN-0011(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230512(21)ASSE-0053(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231205(21)ASSN-0012(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230313(21)ASSC-0180(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230201(21)ASSB-0007(93)8621300-13	(01)4048675556343(11)230313(21)ASSC-0181(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230201(21)ASSB-0008(93)8621300-13	(01)4048675556343(11)230314(21)ASSC-0182(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230209(21)ASSB-0142(93)8621300-13	(01)4048675556343(11)230314(21)ASSC-0183(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230209(21)ASSB-0143(93)8621300-13	(01)4048675556343(11)230302(21)ASSB-0515(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230209(21)ASSB-0144(93)8621300-13	(01)4048675556343(11)230302(21)ASSB-0517(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230209(21)ASSB-0145(93)8621300-13	(01)4048675556343(11)230307(21)ASSC-0077(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230209(21)ASSB-0141(93)8621300-13	(01)04048675556343(11)240103(21)ASSN-0289(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230111(21)ASSA-0226(93)8621300-13	(01)04048675556343(11)240111(21)ASTA-0007(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230419(21)ASSD-0166(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)231218(21)ASSN-0133(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230419(21)ASSD-0167(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)240207(21)ASTA-0341(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231018(21)ASSL-0253(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)240207(21)ASTA-0342(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231017(21)ASSL-0213(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)240119(21)ASTA-0109(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231017(21)ASSL-0224(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)240119(21)ASTA-0110(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231013(21)ASSL-0182(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)240119(21)ASTA-0111(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231013(21)ASSL-0183(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)240122(21)ASTA-0141(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230901(21)ASSJ-0254(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231109(21)ASSM-0092(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231103(21)ASSL-0439(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231109(21)ASSM-0093(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231129(21)ASSM-0411(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231109(21)ASSM-0094(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)231128(21)ASSM-0412(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230123(21)ASSA-0445(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)231127(21)ASSM-0384(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230123(21)ASSA-0455(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230425(21)ASSD-0233(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230124(21)ASSA-0480(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230425(21)ASSD-0234(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230220(21)ASSB-0317(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230425(21)ASSD-0235(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230228(21)ASSB-0437(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230614(21)ASSF-0095(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230215(21)ASSB-0244(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230606(21)ASSE-0126(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)221216(21)ASRN-0325(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230125(21)ASSA-0521(93)8621300-13	(01)4048675556343(11)221216(21)ASRN-0326(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230125(21)ASSA-0522(93)8621300-13	(01)4048675556343(11)221219(21)ASRN-0342(93)8621300-13
(01)4048675556343(11)230125(21)ASSA-0523(93)8621300-13	(01)4048675556343(11)230411(21)ASSD-0060(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230718(21)ASSH-0120(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230411(21)ASSD-0061(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230718(21)ASSH-0121(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230411(21)ASSD-0062(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230718(21)ASSH-0122(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230412(21)ASSD-0063(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230720(21)ASSH-0142(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)230302(21)ASSB-0494(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230720(21)ASSH-0143(93)8621300-15	(01)04048675556343(11)240117(21)ASTA-0076(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230720(21)ASSH-0144(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231025(21)ASSL-0390(93)8621300-15
(01)4048675556343(11)230720(21)ASSH-0145(93)8621300-15	(01)4048675556343(11)231026(21)ASSL-0391(93)8621300-15

(01)4048675556183(11)240125(21)ASTA-0275(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230214(21)ASSB-0203(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)240125(21)ASTA-0276(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230214(21)ASSB-0204(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)240130(21)ASTA-0352(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230214(21)ASSB-0205(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)240131(21)ASTA-0354(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230214(21)ASSB-0206(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)240201(21)ASTA-0364(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230214(21)ASSB-0207(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)240202(21)ASTA-0395(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230214(21)ASSB-0208(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)240202(21)ASTA-0396(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230109(21)ASSA-0128(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)240202(21)ASTA-0397(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230414(21)ASSD-0117(93)8621600-15
(01)4048675556183(11)240205(21)ASTA-0407(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230417(21)ASSD-0118(93)8621600-15
(01)4048675556183(11)231204(21)ASSM-0464(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230201(21)ASSB-0001(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)231201(21)ASSM-0465(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230201(21)ASSB-0002(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)231204(21)ASSM-0466(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230103(21)ASSA-0031(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)231204(21)ASSM-0467(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230104(21)ASSA-0059(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)231201(21)ASSM-0468(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230104(21)ASSA-0060(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)231204(21)ASSM-0469(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230418(21)ASSD-0149(93)8621600-15
(01)4048675556183(11)231204(21)ASSM-0491(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)221219(21)ASRN-0346(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)231204(21)ASSM-0492(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)221219(21)ASRN-0347(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)231204(21)ASSM-0493(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)221219(21)ASRN-0345(93)8621600-13
(01)4048675556183(11)231204(21)ASSM-0494(93)8621600-15	(01)4048675556183(11)230106(21)ASSA-0099(93)8621600-13

Ventilator kit assembly

Manufacturing month	Serial numbers	
01-2023	ASSA-...	...-0396, ...-0465
02-2023	ASSB-...	...-0224, ...-00233, 0768,0769
03-2023	ASSC-...	...-0653, ...-0666, ...-0670, ...-0711, ...-0721
04-2023	ASSD-...	...-0333, ...-0334
05-2023	ASSE-...	...-0003, ...-0008, ...-0009, ...-0011, ...-0041, ...-0057, ...-0059, ...-0060, ...-0064, ...-0099
06-2023	ASSH-...	...-0258, ...-0259, ...-0264-0268, ...-0270-0274, ...-0276, ...-0279, ...-0280

Tarjeta de respuesta de cliente

Por favor, remita este formulario a Dräger por correo electrónico

D R Ä G E R		Para: Dräger Hispania, SAU
	Departamento:	QARAEHS
	Teléfono:	900116424
	E-mail:	DraegerQARAEHS@draeger.com
Respuesta: Nota Importante de Seguridad sobre la estación Atlan, Abril 2026		
Por favor, cumplimente en mayúsculas los campos inferiores		
D A T O S C L I E N T E	Hospital/Centro:	_____
	Persona de contacto:	_____
	Teléfono:	_____ Fax: _____
	E-mail:	_____
	Dirección:	_____
	Localidad/Provincia:	_____ País: _____
	Nº unidades afectadas:	_____
<input type="checkbox"/> Confirmamos que hemos recibido la Nota de Seguridad y que la información se ha puesto en conocimiento de todos los usuarios afectados.		
Título/posición: _____		
Nombre y Apellidos: _____		
Firma: _____ Fecha: _____		