

Aviso de seguridad urgente

Nombre comercial/Modelo: Desfibrilador externo automático BeneHeart D1

Identificador FSCA: CP2602-JH05958

Tipo de acción: Actualización del manual del operador

18/05/2026

A la atención de:

Estimado/a Sr./Sra.:

Tras un seguimiento continuo de los productos distribuidos, Mindray ha determinado que es necesario revisar el manual del operador del desfibrilador externo automático (DEA) BeneHeart D1. El objetivo de esta carta es proporcionarle la siguiente información:

Detalles sobre los dispositivos afectados:

Los números de serie de los desfibriladores externos automáticos BeneHeart D1 afectados pueden identificarse en las etiquetas. Los números de serie de los dispositivos afectados se enumeran en el apéndice 1.

Descripción del problema:

Para ayudar a los usuarios a comprender mejor el procedimiento para cambiar el tipo de paciente en el desfibrilador externo automático (DEA) BeneHeart D1 de Mindray, Mindray ha actualizado el manual del usuario del DEA BeneHeart D1 con instrucciones de uso más detalladas. Los detalles de la actualización son los siguientes:

1. La sección 5.4 «Procedimiento de DEA» del manual del operador incluye el siguiente contenido: «Compruebe el tipo de paciente en el desfibrilador. Si el tipo de paciente no coincide con el paciente actual, seleccione para configurar el tipo de paciente correctamente».
2. La sección 5.4 «NOTA» del manual del operador incluye el siguiente contenido: «Una vez conectadas las almohadillas de los electrodos MR60 o MR61 al desfibrilador y al paciente, el desfibrilador cambia al modo Adulto. Si el tipo de paciente mostrado no coincide con el paciente real, ajuste manualmente el tipo de paciente».

Esta revisión del manual del operador solo añade información complementaria en forma de mensajes. No se han realizado cambios en el producto en sí ni en sus procedimientos operativos, por lo que no se introducirán nuevos riesgos clínicos.

Naturaleza de la acción correctiva de seguridad

El equipo de servicio técnico de Mindray o el personal de servicio técnico autorizado se pondrá en contacto con usted y le enviará el manual del operador actualizado.

Acciones recomendadas para el CLIENTE/USUARIO:

1. Asegúrese de comunicar este aviso de seguridad a todo el personal correspondiente

dentro de su organización.

2. Después de recibir este aviso de seguridad, puede seguir utilizando el desfibrilador externo automático BeneHeart D1.
3. El equipo de servicio técnico de Mindray o el personal de servicio técnico autorizado se pondrá en contacto con usted lo antes posible y le enviará el manual del operador actualizado.
4. Devuelva el formulario de acuse de recibo del aviso de seguridad a Mindray para confirmar que ha leído y comprendido este aviso.

Acciones recomendadas para el distribuidor:

1. Asegúrese de comunicar este aviso de seguridad a todo el personal correspondiente de su organización y a cualquier organización que haya recibido el desfibrilador externo automático BeneHeart D1 afectado.
2. Si alguno de los desfibriladores externos automáticos BeneHeart D1 de su centro figura en la lista de dispositivos afectados, véndalos a los clientes junto con el manual actualizado. El equipo de servicio técnico de Mindray o el personal de servicio técnico autorizado se pondrá en contacto con usted para proporcionarle el manual del operador actualizado de las unidades afectadas.
3. Ayude al equipo de servicio técnico o al personal de servicio técnico autorizado de Mindray a completar esta acción de FSCA.
4. Devuelva el formulario de acuse de recibo del aviso de seguridad a Mindray para confirmar que ha leído y comprendido este aviso.

Comunicación de este aviso de seguridad:

Asegúrese de comunicar este aviso a todo el personal correspondiente de su organización y a cualquier organización a la que se le hayan enviado los dispositivos potencialmente afectados.

Asegúrese de que se tiene conocimiento de este aviso y de cualquier acción resultante durante un periodo de tiempo adecuado para garantizar la eficacia de las medidas correctivas.

Le rogamos que confirme la recepción de esta carta; para ello, rellene el formulario de acuse de recibo que figura a continuación y envíelo por correo electrónico.

Persona de contacto:

Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas por esta situación. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el técnico del departamento de atención al cliente de Mindray o con el ingeniero del servicio técnico designado: [Maximo Ferruz](#)

Correo electrónico: maximo.ferruz@mindray.com

Este aviso ha sido notificado a la autoridad reguladora correspondiente.

Firma:

Alice Xia

Representante del centro de control de calidad de PMS

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel.: 0086 755 81887277
Correo electrónico: mr@mindray.com

Formulario de acuse de recibo

=====

Confirmación de recepción del aviso de seguridad

Nombre comercial/Modelo: Desfibrilador externo automático BeneHeart D1

Identificador FSCA: CP2602-JH05958

Tipo de acción: Actualización del manual

Rellene este formulario y devuelva la confirmación a través de correo electrónico a la mayor brevedad.

Correo electrónico: maximo.ferruz@mindray.com

Nombre: _____

N.º de tel.: _____

Dirección de correo electrónico: _____

Fecha y firma: _____

Dirección de la organización:

Apéndice 1 Lista de dispositivos afectados

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
1	BeneHeart D1	FQ-01046331	41	BeneHeart D1	FQ-33064274
2	BeneHeart D1	FQ-03047986	42	BeneHeart D1	FQ-37064469
3	BeneHeart D1	FQ-03047987	43	BeneHeart D1	FQ-3A064594
4	BeneHeart D1	FQ-03047988	44	BeneHeart D1	FQ-3A064595
5	BeneHeart D1	FQ-03047989	45	BeneHeart D1	FQ-3B000123
6	BeneHeart D1	FQ-03047990	46	BeneHeart D1	FQ-3B000124
7	BeneHeart D1	FQ-03047991	47	BeneHeart D1	FQ-3B064747
8	BeneHeart D1	FQ-03047992	48	BeneHeart D1	FQ-3B064748
9	BeneHeart D1	FQ-03047993	49	BeneHeart D1	FQ-3C064769
10	BeneHeart D1	FQ-03047994	50	BeneHeart D1	FQ-3C064770
11	BeneHeart D1	FQ-03047995	51	BeneHeart D1	FQ-3C064771
12	BeneHeart D1	FQ-03047996	52	BeneHeart D1	FQ-3C064772
13	BeneHeart D1	FQ-03047997	53	BeneHeart D1	FQ-3C064773
14	BeneHeart D1	FQ-03048324	54	BeneHeart D1	FQ-3C064774
15	BeneHeart D1	FQ-03048512	55	BeneHeart D1	FQ-3C064775
16	BeneHeart D1	FQ-03048729	56	BeneHeart D1	FQ-3C064776
17	BeneHeart D1	FQ-04048978	57	BeneHeart D1	FQ-3C064777
18	BeneHeart D1	FQ-14058412	58	BeneHeart D1	FQ-3C064778
19	BeneHeart D1	FQ-15058472	59	BeneHeart D1	FQ-3C064823
20	BeneHeart D1	FQ-1C061929	60	BeneHeart D1	FQ-3C064824
21	BeneHeart D1	FQ-1C061930	61	BeneHeart D1	FQ-3C064825
22	BeneHeart D1	FQ-21062226	62	BeneHeart D1	FQ-3C064826
23	BeneHeart D1	FQ-21062227	63	BeneHeart D1	FQ-3C064827
24	BeneHeart D1	FQ-21062228	64	BeneHeart D1	FQ-3C064828
25	BeneHeart D1	FQ-21062229	65	BeneHeart D1	FQ-3C064829
26	BeneHeart D1	FQ-21062230	66	BeneHeart D1	FQ-3C064830
27	BeneHeart D1	FQ-22062287	67	BeneHeart D1	FQ-3C064831
28	BeneHeart D1	FQ-22062288	68	BeneHeart D1	FQ-3C064832
29	BeneHeart D1	FQ-22062289	69	BeneHeart D1	FQ-3C064833
30	BeneHeart D1	FQ-22062290	70	BeneHeart D1	FQ-3C064834
31	BeneHeart D1	FQ-22062292	71	BeneHeart D1	FQ-3C064835
32	BeneHeart D1	FQ-22062405	72	BeneHeart D1	FQ-3C064836
33	BeneHeart D1	FQ-2A063733	73	BeneHeart D1	FQ-3C064837
34	BeneHeart D1	FQ-32064185	74	BeneHeart D1	FQ-3C064838
35	BeneHeart D1	FQ-32064186	75	BeneHeart D1	FQ-3C064839
36	BeneHeart D1	FQ-32064187	76	BeneHeart D1	FQ-3C064840
37	BeneHeart D1	FQ-32064188	77	BeneHeart D1	FQ-3C064841
38	BeneHeart D1	FQ-32064189	78	BeneHeart D1	FQ-3C064842
39	BeneHeart D1	FQ-33064272	79	BeneHeart D1	FQ-3C064843
40	BeneHeart D1	FQ-33064273	80	BeneHeart D1	FQ-3C064844

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
81	BeneHeart D1	FQ-3C064845	121	BeneHeart D1	FQ-3C064885
82	BeneHeart D1	FQ-3C064846	122	BeneHeart D1	FQ-3C064886
83	BeneHeart D1	FQ-3C064847	123	BeneHeart D1	FQ-3C064887
84	BeneHeart D1	FQ-3C064848	124	BeneHeart D1	FQ-3C064888
85	BeneHeart D1	FQ-3C064849	125	BeneHeart D1	FQ-3C064889
86	BeneHeart D1	FQ-3C064850	126	BeneHeart D1	FQ-3C064890
87	BeneHeart D1	FQ-3C064851	127	BeneHeart D1	FQ-3C064891
88	BeneHeart D1	FQ-3C064852	128	BeneHeart D1	FQ-3C064892
89	BeneHeart D1	FQ-3C064853	129	BeneHeart D1	FQ-3C064893
90	BeneHeart D1	FQ-3C064854	130	BeneHeart D1	FQ-3C064894
91	BeneHeart D1	FQ-3C064855	131	BeneHeart D1	FQ-3C064895
92	BeneHeart D1	FQ-3C064856	132	BeneHeart D1	FQ-3C064896
93	BeneHeart D1	FQ-3C064857	133	BeneHeart D1	FQ-3C064897
94	BeneHeart D1	FQ-3C064858	134	BeneHeart D1	FQ-3C064898
95	BeneHeart D1	FQ-3C064859	135	BeneHeart D1	FQ-3C064899
96	BeneHeart D1	FQ-3C064860	136	BeneHeart D1	FQ-3C064900
97	BeneHeart D1	FQ-3C064861	137	BeneHeart D1	FQ-3C064901
98	BeneHeart D1	FQ-3C064862	138	BeneHeart D1	FQ-3C064902
99	BeneHeart D1	FQ-3C064863	139	BeneHeart D1	FQ-3C064903
100	BeneHeart D1	FQ-3C064864	140	BeneHeart D1	FQ-3C064904
101	BeneHeart D1	FQ-3C064865	141	BeneHeart D1	FQ-3C064905
102	BeneHeart D1	FQ-3C064866	142	BeneHeart D1	FQ-3C064906
103	BeneHeart D1	FQ-3C064867	143	BeneHeart D1	FQ-3C064907
104	BeneHeart D1	FQ-3C064868	144	BeneHeart D1	FQ-3C064908
105	BeneHeart D1	FQ-3C064869	145	BeneHeart D1	FQ-3C064909
106	BeneHeart D1	FQ-3C064870	146	BeneHeart D1	FQ-3C064910
107	BeneHeart D1	FQ-3C064871	147	BeneHeart D1	FQ-3C064911
108	BeneHeart D1	FQ-3C064872	148	BeneHeart D1	FQ-3C064912
109	BeneHeart D1	FQ-3C064873	149	BeneHeart D1	FQ-3C064913
110	BeneHeart D1	FQ-3C064874	150	BeneHeart D1	FQ-3C064914
111	BeneHeart D1	FQ-3C064875	151	BeneHeart D1	FQ-3C064915
112	BeneHeart D1	FQ-3C064876	152	BeneHeart D1	FQ-41064941
113	BeneHeart D1	FQ-3C064877	153	BeneHeart D1	FQ-41064942
114	BeneHeart D1	FQ-3C064878	154	BeneHeart D1	FQ-41064943
115	BeneHeart D1	FQ-3C064879	155	BeneHeart D1	FQ-41064944
116	BeneHeart D1	FQ-3C064880	156	BeneHeart D1	FQ-41064945
117	BeneHeart D1	FQ-3C064881	157	BeneHeart D1	FQ-41064946
118	BeneHeart D1	FQ-3C064882	158	BeneHeart D1	FQ-41064947
119	BeneHeart D1	FQ-3C064883	159	BeneHeart D1	FQ-41064948
120	BeneHeart D1	FQ-3C064884	160	BeneHeart D1	FQ-41064949

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
161	BeneHeart D1	FQ-41064950	201	BeneHeart D1	FQ-4B001756T
162	BeneHeart D1	FQ-41064951	202	BeneHeart D1	FQ-4B001757T
163	BeneHeart D1	FQ-41064952	203	BeneHeart D1	FQ-4B001762T
164	BeneHeart D1	FQ-41064953	204	BeneHeart D1	FQ-4B001763T
165	BeneHeart D1	FQ-41064954	205	BeneHeart D1	FQ-4B001768
166	BeneHeart D1	FQ-41064955	206	BeneHeart D1	FQ-4B001769
167	BeneHeart D1	FQ-41064956	207	BeneHeart D1	FQ-4B001770
168	BeneHeart D1	FQ-41064957	208	BeneHeart D1	FQ-4B002014
169	BeneHeart D1	FQ-41064958	209	BeneHeart D1	FQ-4C002077
170	BeneHeart D1	FQ-41064959	210	BeneHeart D1	FQ-4C002078
171	BeneHeart D1	FQ-41064960	211	BeneHeart D1	FQ-4C002079
172	BeneHeart D1	FQ-41064961	212	BeneHeart D1	FQ-4C002080
173	BeneHeart D1	FQ-41064962	213	BeneHeart D1	FQ-4C002094
174	BeneHeart D1	FQ-41064963	214	BeneHeart D1	FQ-4C002095
175	BeneHeart D1	FQ-41064964	215	BeneHeart D1	FQ-4C002096
176	BeneHeart D1	FQ-41064965	216	BeneHeart D1	FQ-4C002097
177	BeneHeart D1	FQ-41064966	217	BeneHeart D1	FQ-4C002098
178	BeneHeart D1	FQ-41064967	218	BeneHeart D1	FQ-4C002099
179	BeneHeart D1	FQ-41064968	219	BeneHeart D1	FQ-4C002179
180	BeneHeart D1	FQ-41064969	220	BeneHeart D1	FQ-4C002181
181	BeneHeart D1	FQ-41064970	221	BeneHeart D1	FQ-4C002184
182	BeneHeart D1	FQ-43000470	222	BeneHeart D1	FQ-4C066971
183	BeneHeart D1	FQ-43000471	223	BeneHeart D1	FQ-4C066972
184	BeneHeart D1	FQ-43000472	224	BeneHeart D1	FQ-4C066973
185	BeneHeart D1	FQ-43000482	225	BeneHeart D1	FQ-4C066974
186	BeneHeart D1	FQ-46066410	226	BeneHeart D1	FQ-4C066975
187	BeneHeart D1	FQ-48001363	227	BeneHeart D1	FQ-4C066976
188	BeneHeart D1	FQ-49001365	228	BeneHeart D1	FQ-4C066977
189	BeneHeart D1	FQ-49001521	229	BeneHeart D1	FQ-4C066978
190	BeneHeart D1	FQ-49001522	230	BeneHeart D1	FQ-4C066979
191	BeneHeart D1	FQ-49001590	231	BeneHeart D1	FQ-4C066980
192	BeneHeart D1	FQ-49001591	232	BeneHeart D1	FQ-4C066981
193	BeneHeart D1	FQ-49001592	233	BeneHeart D1	FQ-4C066982
194	BeneHeart D1	FQ-49001593	234	BeneHeart D1	FQ-4C066983
195	BeneHeart D1	FQ-49001594	235	BeneHeart D1	FQ-4C066984
196	BeneHeart D1	FQ-4B001749T	236	BeneHeart D1	FQ-4C066985
197	BeneHeart D1	FQ-4B001750T	237	BeneHeart D1	FQ-4C066986
198	BeneHeart D1	FQ-4B001753T	238	BeneHeart D1	FQ-4C066987
199	BeneHeart D1	FQ-4B001754T	239	BeneHeart D1	FQ-4C066988
200	BeneHeart D1	FQ-4B001755T	240	BeneHeart D1	FQ-4C066989

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
241	BeneHeart D1	FQ-4C066990	281	BeneHeart D1	FQ-52067726
242	BeneHeart D1	FQ-4C066991	282	BeneHeart D1	FQ-52067727
243	BeneHeart D1	FQ-4C066992	283	BeneHeart D1	FQ-52067728
244	BeneHeart D1	FQ-4C066993	284	BeneHeart D1	FQ-52067729
245	BeneHeart D1	FQ-4C066994	285	BeneHeart D1	FQ-52067730
246	BeneHeart D1	FQ-4C066995	286	BeneHeart D1	FQ-52067731
247	BeneHeart D1	FQ-4C066996	287	BeneHeart D1	FQ-52067732
248	BeneHeart D1	FQ-4C066997	288	BeneHeart D1	FQ-52067733
249	BeneHeart D1	FQ-4C066998	289	BeneHeart D1	FQ-52067734
250	BeneHeart D1	FQ-4C066999	290	BeneHeart D1	FQ-52067735
251	BeneHeart D1	FQ-4C067000	291	BeneHeart D1	FQ-52067736
252	BeneHeart D1	FQ-4C067001	292	BeneHeart D1	FQ-52067737
253	BeneHeart D1	FQ-4C067002	293	BeneHeart D1	FQ-52067738
254	BeneHeart D1	FQ-4C067003	294	BeneHeart D1	FQ-52067739
255	BeneHeart D1	FQ-4C067004	295	BeneHeart D1	FQ-52067740
256	BeneHeart D1	FQ-4C067005	296	BeneHeart D1	FQ-52067741
257	BeneHeart D1	FQ-51002268	297	BeneHeart D1	FQ-52067742
258	BeneHeart D1	FQ-51002269	298	BeneHeart D1	FQ-52067743
259	BeneHeart D1	FQ-51002270	299	BeneHeart D1	FQ-52067744
260	BeneHeart D1	FQ-52067705	300	BeneHeart D1	FQ-52067745
261	BeneHeart D1	FQ-52067706	301	BeneHeart D1	FQ-52067746
262	BeneHeart D1	FQ-52067707	302	BeneHeart D1	FQ-52067747
263	BeneHeart D1	FQ-52067708	303	BeneHeart D1	FQ-52067748
264	BeneHeart D1	FQ-52067709	304	BeneHeart D1	FQ-52067749
265	BeneHeart D1	FQ-52067710	305	BeneHeart D1	FQ-52067750
266	BeneHeart D1	FQ-52067711	306	BeneHeart D1	FQ-52067751
267	BeneHeart D1	FQ-52067712	307	BeneHeart D1	FQ-52067752
268	BeneHeart D1	FQ-52067713	308	BeneHeart D1	FQ-52067753
269	BeneHeart D1	FQ-52067714	309	BeneHeart D1	FQ-52067754
270	BeneHeart D1	FQ-52067715	310	BeneHeart D1	FQ-52067755
271	BeneHeart D1	FQ-52067716	311	BeneHeart D1	FQ-52067756
272	BeneHeart D1	FQ-52067717	312	BeneHeart D1	FQ-52067757
273	BeneHeart D1	FQ-52067718	313	BeneHeart D1	FQ-52067758
274	BeneHeart D1	FQ-52067719	314	BeneHeart D1	FQ-52067759
275	BeneHeart D1	FQ-52067720	315	BeneHeart D1	FQ-52067760
276	BeneHeart D1	FQ-52067721	316	BeneHeart D1	FQ-52067761
277	BeneHeart D1	FQ-52067722	317	BeneHeart D1	FQ-52067762
278	BeneHeart D1	FQ-52067723	318	BeneHeart D1	FQ-52067763
279	BeneHeart D1	FQ-52067724	319	BeneHeart D1	FQ-52067764
280	BeneHeart D1	FQ-52067725	320	BeneHeart D1	FQ-52067765

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
321	BeneHeart D1	FQ-52067766	361	BeneHeart D1	FQ-54002449
322	BeneHeart D1	FQ-52067767	362	BeneHeart D1	FQ-54002450
323	BeneHeart D1	FQ-52067768	363	BeneHeart D1	FQ-54002451
324	BeneHeart D1	FQ-52067769	364	BeneHeart D1	FQ-54002452
325	BeneHeart D1	FQ-52067770	365	BeneHeart D1	FQ-54002453
326	BeneHeart D1	FQ-52067771	366	BeneHeart D1	FQ-54002454
327	BeneHeart D1	FQ-52067772	367	BeneHeart D1	FQ-54002455
328	BeneHeart D1	FQ-52067773	368	BeneHeart D1	FQ-54002456
329	BeneHeart D1	FQ-52067774	369	BeneHeart D1	FQ-54002457
330	BeneHeart D1	FQ-52067775	370	BeneHeart D1	FQ-54002458
331	BeneHeart D1	FQ-52067776	371	BeneHeart D1	FQ-54002459
332	BeneHeart D1	FQ-52067777	372	BeneHeart D1	FQ-54002460
333	BeneHeart D1	FQ-52067778	373	BeneHeart D1	FQ-55002530
334	BeneHeart D1	FQ-52067779	374	BeneHeart D1	FQ-55002531
335	BeneHeart D1	FQ-52067780	375	BeneHeart D1	FQ-55068147
336	BeneHeart D1	FQ-52067781	376	BeneHeart D1	FQ-55068150
337	BeneHeart D1	FQ-52067782	377	BeneHeart D1	FQ-55068151
338	BeneHeart D1	FQ-52067783	378	BeneHeart D1	FQ-55068152
339	BeneHeart D1	FQ-52067784	379	BeneHeart D1	FQ-55068153
340	BeneHeart D1	FQ-52067785	380	BeneHeart D1	FQ-55068154
341	BeneHeart D1	FQ-52067786	381	BeneHeart D1	FQ-55068155
342	BeneHeart D1	FQ-52067787	382	BeneHeart D1	FQ-55068156
343	BeneHeart D1	FQ-52067788	383	BeneHeart D1	FQ-55068157
344	BeneHeart D1	FQ-52067789	384	BeneHeart D1	FQ-55068158
345	BeneHeart D1	FQ-52067790	385	BeneHeart D1	FQ-55068159
346	BeneHeart D1	FQ-52067791	386	BeneHeart D1	FQ-55068160
347	BeneHeart D1	FQ-52067792	387	BeneHeart D1	FQ-55068161
348	BeneHeart D1	FQ-52067793	388	BeneHeart D1	FQ-55068162
349	BeneHeart D1	FQ-52067794	389	BeneHeart D1	FQ-55068164
350	BeneHeart D1	FQ-53002437	390	BeneHeart D1	FQ-55068165
351	BeneHeart D1	FQ-53067878	391	BeneHeart D1	FQ-55068166
352	BeneHeart D1	FQ-53067879	392	BeneHeart D1	FQ-55068167
353	BeneHeart D1	FQ-53067880	393	BeneHeart D1	FQ-55068169
354	BeneHeart D1	FQ-53067881	394	BeneHeart D1	FQ-55068170
355	BeneHeart D1	FQ-53067882	395	BeneHeart D1	FQ-55068171
356	BeneHeart D1	FQ-53067883	396	BeneHeart D1	FQ-55068173
357	BeneHeart D1	FQ-54002445	397	BeneHeart D1	FQ-55068174
358	BeneHeart D1	FQ-54002446	398	BeneHeart D1	FQ-55068175
359	BeneHeart D1	FQ-54002447	399	BeneHeart D1	FQ-55068177
360	BeneHeart D1	FQ-54002448	400	BeneHeart D1	FQ-55068178

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
401	BeneHeart D1	FQ-55068179	441	BeneHeart D1	FQ-57002975
402	BeneHeart D1	FQ-56002624	442	BeneHeart D1	FQ-57002976
403	BeneHeart D1	FQ-56002625	443	BeneHeart D1	FQ-57002977
404	BeneHeart D1	FQ-56002626	444	BeneHeart D1	FQ-57002978
405	BeneHeart D1	FQ-56002627	445	BeneHeart D1	FQ-57002979
406	BeneHeart D1	FQ-56002628	446	BeneHeart D1	FQ-57002980
407	BeneHeart D1	FQ-56002630	447	BeneHeart D1	FQ-57002981
408	BeneHeart D1	FQ-56002631	448	BeneHeart D1	FQ-57002982
409	BeneHeart D1	FQ-56002633	449	BeneHeart D1	FQ-57002983
410	BeneHeart D1	FQ-56002634	450	BeneHeart D1	FQ-57002984
411	BeneHeart D1	FQ-56002635	451	BeneHeart D1	FQ-57002985
412	BeneHeart D1	FQ-56002636	452	BeneHeart D1	FQ-57002986
413	BeneHeart D1	FQ-56002693	453	BeneHeart D1	FQ-57002987
414	BeneHeart D1	FQ-57002938	454	BeneHeart D1	FQ-57002988
415	BeneHeart D1	FQ-57002949	455	BeneHeart D1	FQ-57068333
416	BeneHeart D1	FQ-57002950	456	BeneHeart D1	FQ-57068334
417	BeneHeart D1	FQ-57002951	457	BeneHeart D1	FQ-58002994
418	BeneHeart D1	FQ-57002952	458	BeneHeart D1	FQ-58002995
419	BeneHeart D1	FQ-57002953	459	BeneHeart D1	FQ-58002996
420	BeneHeart D1	FQ-57002954	460	BeneHeart D1	FQ-58002997
421	BeneHeart D1	FQ-57002955	461	BeneHeart D1	FQ-58002998
422	BeneHeart D1	FQ-57002956	462	BeneHeart D1	FQ-58002999
423	BeneHeart D1	FQ-57002957	463	BeneHeart D1	FQ-58003000
424	BeneHeart D1	FQ-57002958	464	BeneHeart D1	FQ-59003245
425	BeneHeart D1	FQ-57002959	465	BeneHeart D1	FQ-59003246
426	BeneHeart D1	FQ-57002960	466	BeneHeart D1	FQ-5A003360
427	BeneHeart D1	FQ-57002961	467	BeneHeart D1	FQ-5A068789
428	BeneHeart D1	FQ-57002962	468	BeneHeart D1	FQ-5A068790
429	BeneHeart D1	FQ-57002963	469	BeneHeart D1	FQ-5A068791
430	BeneHeart D1	FQ-57002964	470	BeneHeart D1	FQ-5A068792
431	BeneHeart D1	FQ-57002965	471	BeneHeart D1	FQ-5A068793
432	BeneHeart D1	FQ-57002966	472	BeneHeart D1	FQ-5A068794
433	BeneHeart D1	FQ-57002967	473	BeneHeart D1	FQ-5A068795
434	BeneHeart D1	FQ-57002968	474	BeneHeart D1	FQ-5A068796
435	BeneHeart D1	FQ-57002969	475	BeneHeart D1	FQ-5A068797
436	BeneHeart D1	FQ-57002970	476	BeneHeart D1	FQ-5A068798
437	BeneHeart D1	FQ-57002971	477	BeneHeart D1	FQ-5A068799
438	BeneHeart D1	FQ-57002972	478	BeneHeart D1	FQ-5A068800
439	BeneHeart D1	FQ-57002973	479	BeneHeart D1	FQ-5A068801
440	BeneHeart D1	FQ-57002974	480	BeneHeart D1	FQ-5A068802

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
481	BeneHeart D1	FQ-5A068803	521	BeneHeart D1	FQ-74008958
482	BeneHeart D1	FQ-5A068804	522	BeneHeart D1	FQ-74009073
483	BeneHeart D1	FQ-5A068805	523	BeneHeart D1	FQ-74009095
484	BeneHeart D1	FQ-5A068806	524	BeneHeart D1	FQ-74009132
485	BeneHeart D1	FQ-5A068807	525	BeneHeart D1	FQ-74009133
486	BeneHeart D1	FQ-5A068808	526	BeneHeart D1	FQ-74009134
487	BeneHeart D1	FQ-5B003949	527	BeneHeart D1	FQ-77010959
488	BeneHeart D1	FQ-5B068880	528	BeneHeart D1	FQ-77010961
489	BeneHeart D1	FQ-5B068881	529	BeneHeart D1	FQ-79011654
490	BeneHeart D1	FQ-5C004056	530	BeneHeart D1	FQ-7B013683
491	BeneHeart D1	FQ-5C004057	531	BeneHeart D1	FQ-7B013684
492	BeneHeart D1	FQ-5C004058	532	BeneHeart D1	FQ-7B013685
493	BeneHeart D1	FQ-5C004059	533	BeneHeart D1	FQ-7B013686
494	BeneHeart D1	FQ-5C004060	534	BeneHeart D1	FQ-7B013687
495	BeneHeart D1	FQ-64005286	535	BeneHeart D1	FQ-7B013688
496	BeneHeart D1	FQ-64005374	536	BeneHeart D1	FQ-7B013689
497	BeneHeart D1	FQ-65005530	537	BeneHeart D1	FQ-7B013690
498	BeneHeart D1	FQ-65005531	538	BeneHeart D1	FQ-7B013691
499	BeneHeart D1	FQ-66005915	539	BeneHeart D1	FQ-7B013692
500	BeneHeart D1	FQ-66005916	540	BeneHeart D1	FQ-7C014293
501	BeneHeart D1	FQ-66005917	541	BeneHeart D1	FQ-7C014294
502	BeneHeart D1	FQ-66005918	542	BeneHeart D1	FQ-7C014296
503	BeneHeart D1	FQ-67006099	543	BeneHeart D1	FQ-7C014297
504	BeneHeart D1	FQ-67006100	544	BeneHeart D1	FQ-7C014298
505	BeneHeart D1	FQ-67006101	545	BeneHeart D1	FQ-7C014299
506	BeneHeart D1	FQ-68006407	546	BeneHeart D1	FQ-7C014304
507	BeneHeart D1	FQ-69006472	547	BeneHeart D1	FQ-7C014305
508	BeneHeart D1	FQ-69006473	548	BeneHeart D1	FQ-7C014306
509	BeneHeart D1	FQ-69006474	549	BeneHeart D1	FQ-7C014307
510	BeneHeart D1	FQ-69006475	550	BeneHeart D1	FQ-7C014825
511	BeneHeart D1	FQ-71007942	551	BeneHeart D1	FQ-7C015113
512	BeneHeart D1	FQ-72008272	552	BeneHeart D1	FQ-7C015114
513	BeneHeart D1	FQ-72008273	553	BeneHeart D1	FQ-7C015115
514	BeneHeart D1	FQ-72008274	554	BeneHeart D1	FQ-7C015116
515	BeneHeart D1	FQ-72008275	555	BeneHeart D1	FQ-7C015117
516	BeneHeart D1	FQ-72008411	556	BeneHeart D1	FQ-7C015118
517	BeneHeart D1	FQ-72008412	557	BeneHeart D1	FQ-7C015119
518	BeneHeart D1	FQ-73008595	558	BeneHeart D1	FQ-7C015120
519	BeneHeart D1	FQ-74008956	559	BeneHeart D1	FQ-7C015121
520	BeneHeart D1	FQ-74008957	560	BeneHeart D1	FQ-7C015122

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
561	BeneHeart D1	FQ-83015524	601	BeneHeart D1	FQ-85017720
562	BeneHeart D1	FQ-83015742	602	BeneHeart D1	FQ-86017908
563	BeneHeart D1	FQ-83015745	603	BeneHeart D1	FQ-86017910
564	BeneHeart D1	FQ-83015753	604	BeneHeart D1	FQ-86017911
565	BeneHeart D1	FQ-83015756	605	BeneHeart D1	FQ-86017912
566	BeneHeart D1	FQ-83015761	606	BeneHeart D1	FQ-86017913
567	BeneHeart D1	FQ-83015763	607	BeneHeart D1	FQ-86017918
568	BeneHeart D1	FQ-83015768	608	BeneHeart D1	FQ-86017999
569	BeneHeart D1	FQ-83015770	609	BeneHeart D1	FQ-86018000
570	BeneHeart D1	FQ-83015772	610	BeneHeart D1	FQ-86018001
571	BeneHeart D1	FQ-83015776	611	BeneHeart D1	FQ-86018002
572	BeneHeart D1	FQ-83015779	612	BeneHeart D1	FQ-87019120
573	BeneHeart D1	FQ-83015780	613	BeneHeart D1	FQ-87019121
574	BeneHeart D1	FQ-83015830	614	BeneHeart D1	FQ-87019122
575	BeneHeart D1	FQ-83015850	615	BeneHeart D1	FQ-87019123
576	BeneHeart D1	FQ-83015855	616	BeneHeart D1	FQ-87019124
577	BeneHeart D1	FQ-83016025	617	BeneHeart D1	FQ-89020756
578	BeneHeart D1	FQ-84016103	618	BeneHeart D1	FQ-8A021049
579	BeneHeart D1	FQ-85017239	619	BeneHeart D1	FQ-8A021552
580	BeneHeart D1	FQ-85017240	620	BeneHeart D1	FQ-8B021929
581	BeneHeart D1	FQ-85017256	621	BeneHeart D1	FQ-8B021936
582	BeneHeart D1	FQ-85017259	622	BeneHeart D1	FQ-8B021937
583	BeneHeart D1	FQ-85017271	623	BeneHeart D1	FQ-8B021938
584	BeneHeart D1	FQ-85017275	624	BeneHeart D1	FQ-8B021939
585	BeneHeart D1	FQ-85017289	625	BeneHeart D1	FQ-8B021940
586	BeneHeart D1	FQ-85017291	626	BeneHeart D1	FQ-8C024378
587	BeneHeart D1	FQ-85017294	627	BeneHeart D1	FQ-8C024379
588	BeneHeart D1	FQ-85017295	628	BeneHeart D1	FQ-8C024380
589	BeneHeart D1	FQ-85017297	629	BeneHeart D1	FQ-8C024381
590	BeneHeart D1	FQ-85017299	630	BeneHeart D1	FQ-8C024383
591	BeneHeart D1	FQ-85017303	631	BeneHeart D1	FQ-8C024384
592	BeneHeart D1	FQ-85017304	632	BeneHeart D1	FQ-8C024385
593	BeneHeart D1	FQ-85017305	633	BeneHeart D1	FQ-8C024387
594	BeneHeart D1	FQ-85017306	634	BeneHeart D1	FQ-8C024388
595	BeneHeart D1	FQ-85017307	635	BeneHeart D1	FQ-8C024390
596	BeneHeart D1	FQ-85017313	636	BeneHeart D1	FQ-8C024392
597	BeneHeart D1	FQ-85017320	637	BeneHeart D1	FQ-8C024398
598	BeneHeart D1	FQ-85017329	638	BeneHeart D1	FQ-8C024399
599	BeneHeart D1	FQ-85017718	639	BeneHeart D1	FQ-91024992
600	BeneHeart D1	FQ-85017719	640	BeneHeart D1	FQ-92025577

No	Commercial Name	Serial Number of products	No	Commercial Name	Serial Number of products
641	BeneHeart D1	FQ-92025578	681	BeneHeart D1	FQ-94028838
642	BeneHeart D1	FQ-92026098	682	BeneHeart D1	FQ-94028849
643	BeneHeart D1	FQ-93027564	683	BeneHeart D1	FQ-94028850
644	BeneHeart D1	FQ-93027565	684	BeneHeart D1	FQ-94028887
645	BeneHeart D1	FQ-93027566	685	BeneHeart D1	FQ-94028964
646	BeneHeart D1	FQ-93027567	686	BeneHeart D1	FQ-94028976
647	BeneHeart D1	FQ-93027568	687	BeneHeart D1	FQ-94028983
648	BeneHeart D1	FQ-93027569	688	BeneHeart D1	FQ-94028988
649	BeneHeart D1	FQ-93027570	689	BeneHeart D1	FQ-95032716
650	BeneHeart D1	FQ-93027571	690	BeneHeart D1	FQ-96033244
651	BeneHeart D1	FQ-93027572	691	BeneHeart D1	FQ-96033245
652	BeneHeart D1	FQ-93027573	692	BeneHeart D1	FQ-96033246
653	BeneHeart D1	FQ-94028611	693	BeneHeart D1	FQ-96033247
654	BeneHeart D1	FQ-94028647	694	BeneHeart D1	FQ-96033248
655	BeneHeart D1	FQ-94028648	695	BeneHeart D1	FQ-96033249
656	BeneHeart D1	FQ-94028649	696	BeneHeart D1	FQ-96033250
657	BeneHeart D1	FQ-94028650	697	BeneHeart D1	FQ-96033251
658	BeneHeart D1	FQ-94028651	698	BeneHeart D1	FQ-96033252
659	BeneHeart D1	FQ-94028652	699	BeneHeart D1	FQ-96033253
660	BeneHeart D1	FQ-94028653	700	BeneHeart D1	FQ-96033254
661	BeneHeart D1	FQ-94028654	701	BeneHeart D1	FQ-96033255
662	BeneHeart D1	FQ-94028687	702	BeneHeart D1	FQ-96033256
663	BeneHeart D1	FQ-94028688	703	BeneHeart D1	FQ-96033257
664	BeneHeart D1	FQ-94028689	704	BeneHeart D1	FQ-96033258
665	BeneHeart D1	FQ-94028690	705	BeneHeart D1	FQ-96033259
666	BeneHeart D1	FQ-94028691	706	BeneHeart D1	FQ-96033260
667	BeneHeart D1	FQ-94028692	707	BeneHeart D1	FQ-96033261
668	BeneHeart D1	FQ-94028693	708	BeneHeart D1	FQ-96033262
669	BeneHeart D1	FQ-94028694	709	BeneHeart D1	FQ-96033263
670	BeneHeart D1	FQ-94028695	710	BeneHeart D1	FQ-96033264
671	BeneHeart D1	FQ-94028696	711	BeneHeart D1	FQ-96033265
672	BeneHeart D1	FQ-94028697	712	BeneHeart D1	FQ-96033621
673	BeneHeart D1	FQ-94028698	713	BeneHeart D1	FQ-96033622
674	BeneHeart D1	FQ-94028699	714	BeneHeart D1	FQ-96033623
675	BeneHeart D1	FQ-94028700	715	BeneHeart D1	FQ-96033624
676	BeneHeart D1	FQ-94028803	716	BeneHeart D1	FQ-96033625
677	BeneHeart D1	FQ-94028817	717	BeneHeart D1	FQ-96033626
678	BeneHeart D1	FQ-94028820	718	BeneHeart D1	FQ-96033627
679	BeneHeart D1	FQ-94028826	719	BeneHeart D1	FQ-96033628
680	BeneHeart D1	FQ-94028833	720	BeneHeart D1	FQ-96033629

No	Commercial Name	Serial Number of products
721	BeneHeart D1	FQ-96033630
722	BeneHeart D1	FQ-96033631
723	BeneHeart D1	FQ-96034112
724	BeneHeart D1	FQ-96034113
725	BeneHeart D1	FQ-97034669
726	BeneHeart D1	FQ-97034670
727	BeneHeart D1	FQ-97034671
728	BeneHeart D1	FQ-97034672
729	BeneHeart D1	FQ-97034673
730	BeneHeart D1	FQ-97034674
731	BeneHeart D1	FQ-97034675
732	BeneHeart D1	FQ-97034677
733	BeneHeart D1	FQ-97034678
734	BeneHeart D1	FQ-98035880
735	BeneHeart D1	FQ-98035881
736	BeneHeart D1	FQ-98037781
737	BeneHeart D1	FQ-99038532
738	BeneHeart D1	FQ-9A039958
739	BeneHeart D1	FQ-9A039959
740	BeneHeart D1	FQ-9A041230
741	BeneHeart D1	FQ-9B041697
742	BeneHeart D1	FQ-9B041998
743	BeneHeart D1	FQ-9B041999
744	BeneHeart D1	FQ-9B042000
745	BeneHeart D1	FQ-9B042001
746	BeneHeart D1	FQ-9B042002
747	BeneHeart D1	FQ-9B042003
748	BeneHeart D1	FQ-9B042004
749	BeneHeart D1	FQ-9B042005
750	BeneHeart D1	FQ-9B042006
751	BeneHeart D1	FQ-9B042007
752	BeneHeart D1	FQ-9C045784